

FFP 2 Atemschutzmasken NR

DIN EN 149:2001+A1:2009 CE 2163


Zur Pandemievorsorge geeignet

Einsatzgebiete


Die Atemschutzmaske schützt gegen feste, wässrige und nicht flüchtige flüssige Aerosole bis zum 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes.

Die Atemschutzmaske ist nur wirksam, wenn sie korrekt ausgewählt, angepasst und unterbrechungslos getragen wird, wenn der Träger einer Schadstoffbelastung ausgesetzt ist.

Gebrauchsanweisung

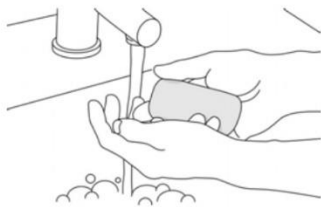

1. Versichern Sie sich, dass die zu benutzende Maske sauber ist.
2. Waschen Sie sich vor Benutzung die Hände, oder desinfizieren Sie diese mit einer geeigneten Lösung.

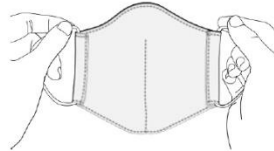

3. Berühren Sie die Maske nur an den Ohrschlaufen beim Aufsetzen.
4. Vermeiden Sie es, die Masken selbst (den Filterstoff) anzufassen.



5. Führen Sie die Maske an Ihr Gesicht und platzieren Sie beide Ohrschlaufen hinter Ihren Ohren.
6. Prüfen Sie den Sitz der Maske um Ihren Mund, Nase und Kinn.

Zertifikat & Konformitätserklärung Hersteller

<https://bit.ly/FQ66-Konformität>

Zhejiang Gen Yuan Tang Medical Technology Co., Ltd.
No.1278-1308 Wanxiang Road, Wanquan Town, Pingyang County,
Wenzhou City, Zhejiang, China

Haltbarkeit

3 Jahre

Kühl & Trocken
lagern

